



- Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/ unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden. Die Sicherheitsnähte sind durch andersfarbige Fäden gekennzeichnet.

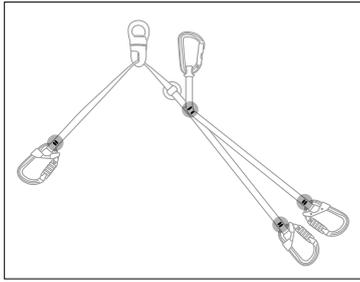


- Überprüfen Sie den Zustand der Metallöse (Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).

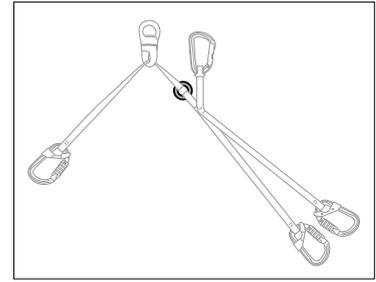


NEST

4. Überprüfung der Außenelemente


- Überprüfen Sie den Zustand der Tragegriffe (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien).

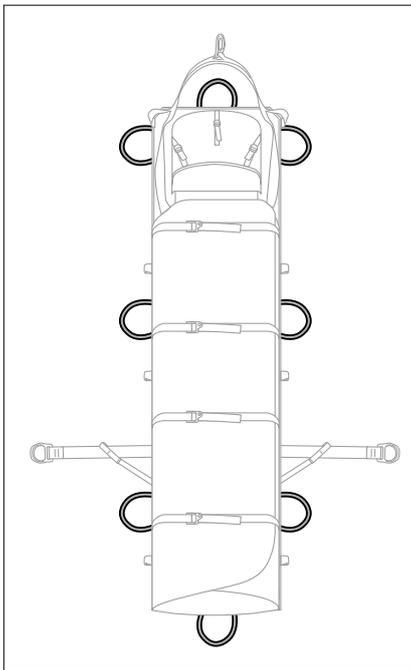


- Überprüfen Sie den Zustand der Verschlussriemen der Umschlagdecke (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien und dem Benutzen der Verschlussriemen).

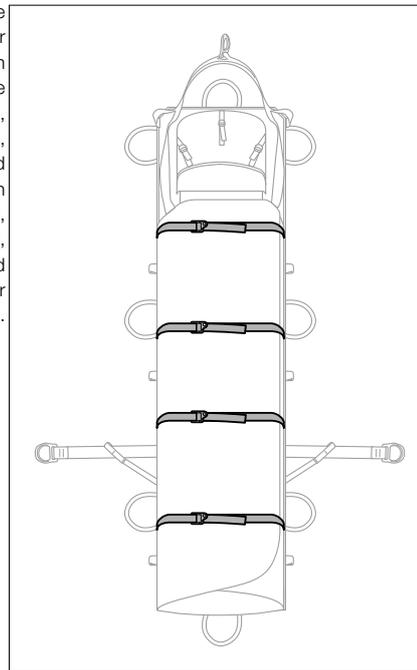


- Überprüfen Sie den Zustand der Umschlagdecke, der Kopf- und Fußhaube und deren Einstellriemen (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien und dem Benutzen der Verschlussriemen).

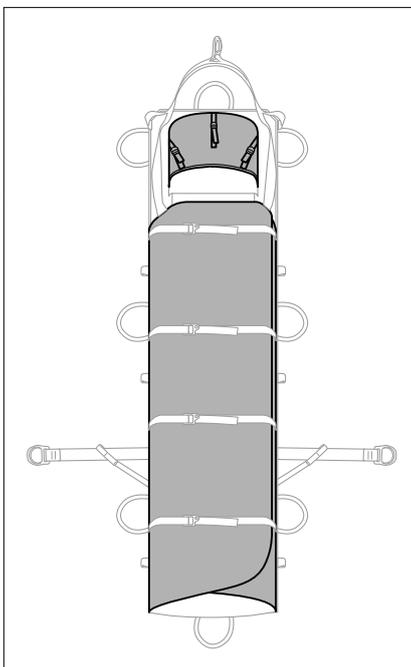


- Überprüfen Sie den Zustand der äußeren Hauptplatte (Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungserscheinungen).

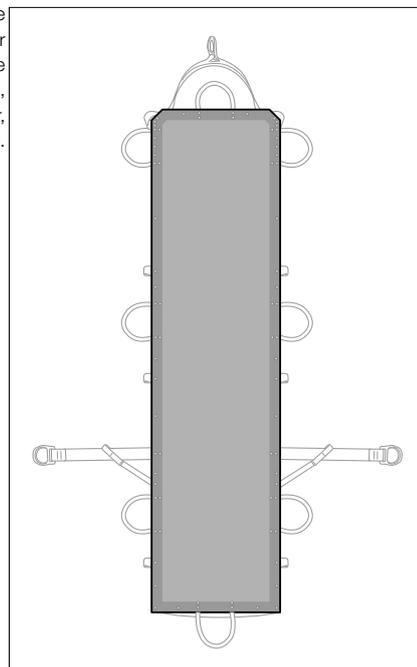


- Überprüfen Sie den Zustand der Nieten (lockere oder fehlende Nieten, Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).

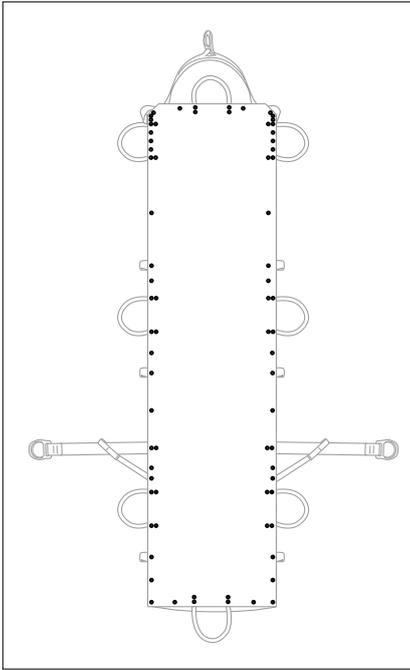


- Überprüfen Sie den Zustand der Befestigungspunkte für Zubehör (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien).

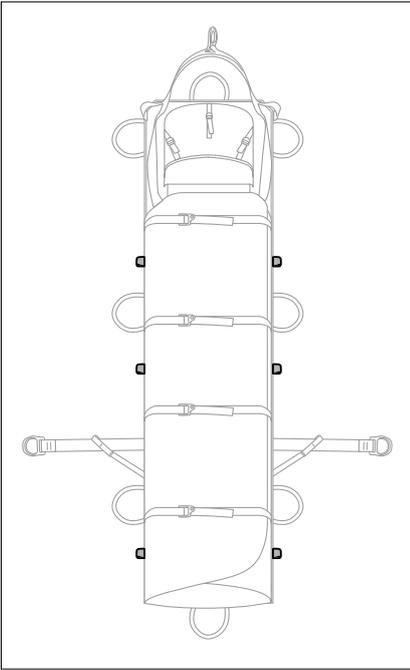

- Holen Sie die Längsstangen heraus und überprüfen Sie ihren Zustand (Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).

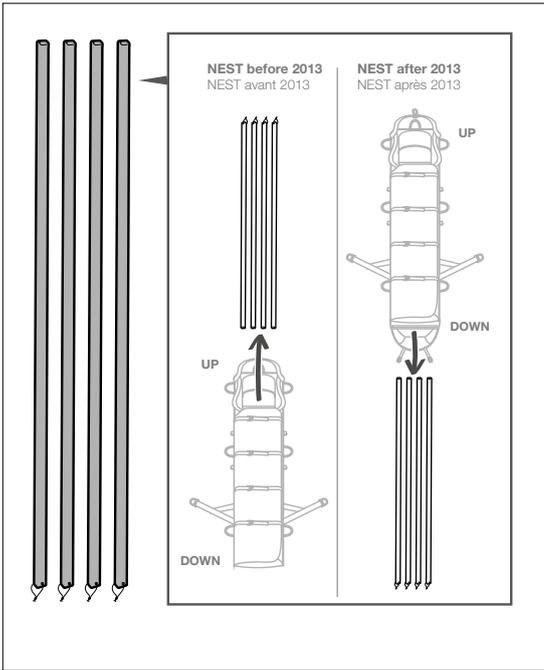


- Holen Sie die Querstangen heraus und überprüfen Sie ihren Zustand (Deformierungen, Risse, Kratzer, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).

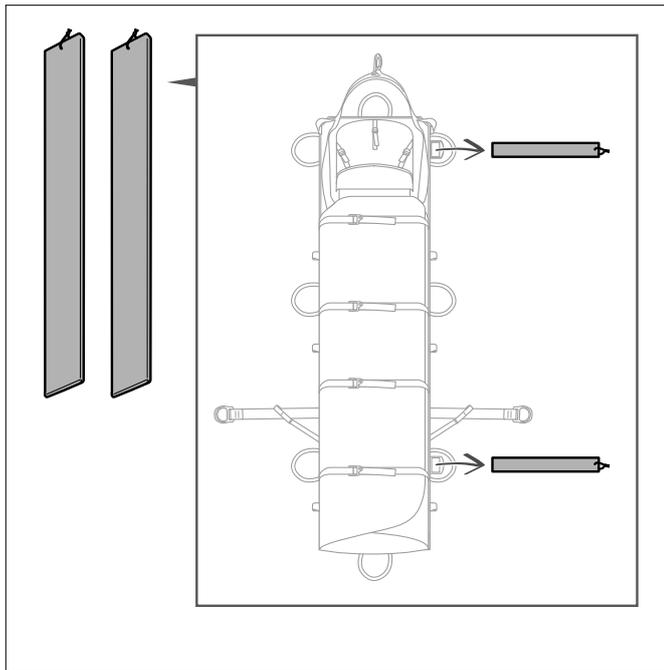

5. Überprüfung der Befestigungspunkte

- Überprüfen Sie den Zustand der Befestigungspunkte aus Metall (Deformierungen, Kratzer, Risse, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen).
- Überprüfen Sie den Zustand der Riemen und Befestigungspunkte aus Textil (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien).
- Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden. Die Sicherheitsnähte sind durch andersfarbige Fäden gekennzeichnet.

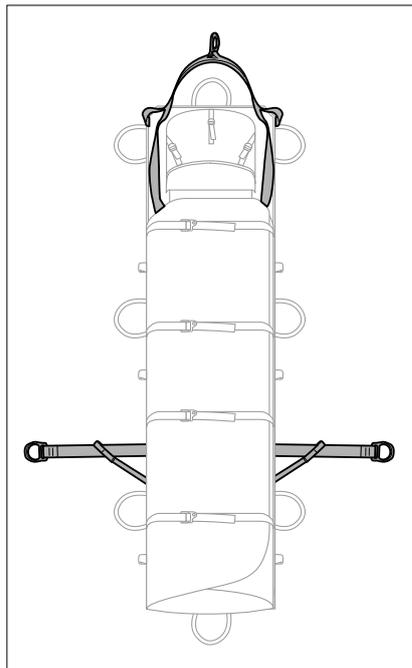


6. Überprüfung des Zustands der Riemen zum Halten der verletzten Person


- Überprüfen Sie den Zustand der Gurtbänder (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien).

Fall nötig, heben Sie die Schaumstoffmatratze an.


- Vergewissern Sie sich, dass die Gurtbandenden umgenäht sind.

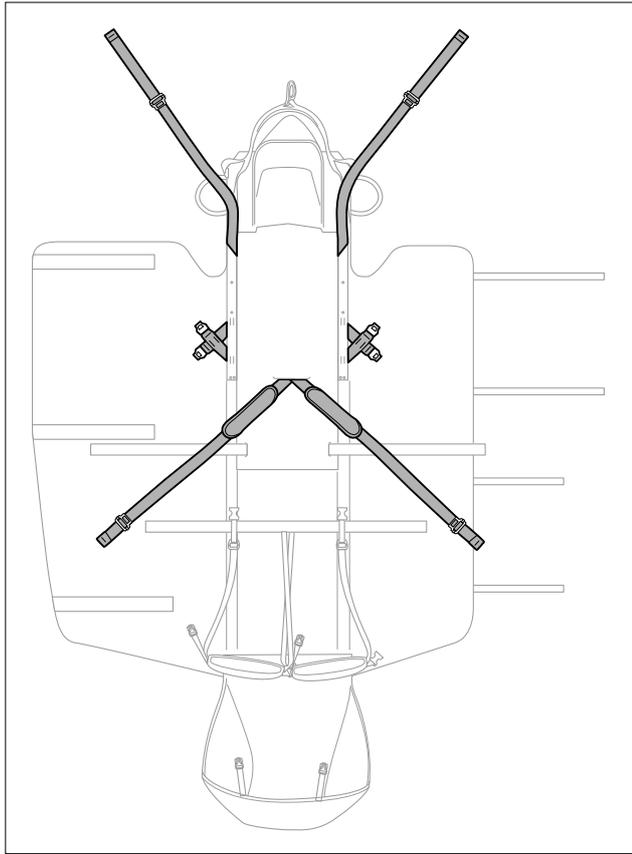


- Überprüfen Sie den Zustand der Sicherheitsnähte (oben/unten). Achten Sie auf lose, abgenutzte oder durchtrennte Fäden. Die Sicherheitsnähte sind durch andersfarbige Fäden gekennzeichnet.

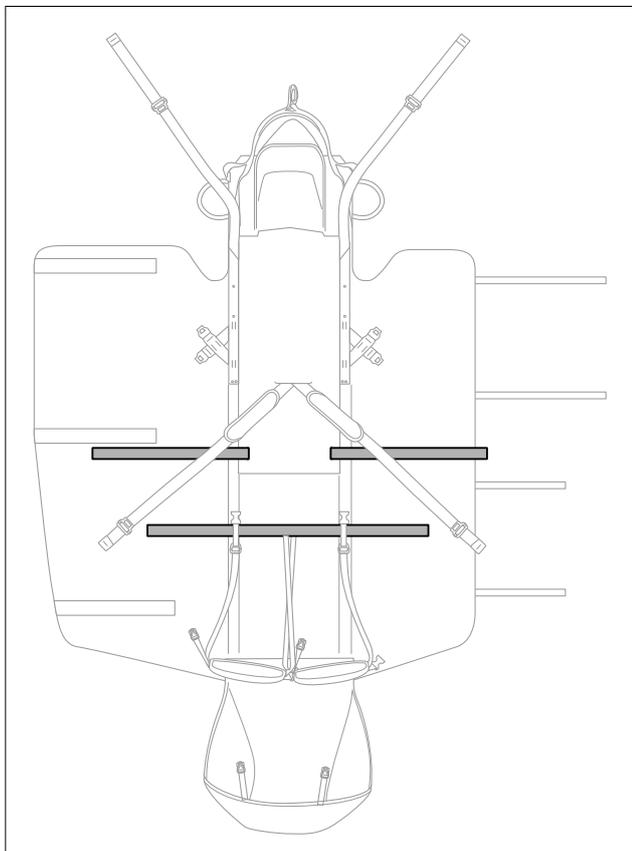

- Überprüfen Sie den Zustand der FAST-Einstellschnallen (Deformierungen, Kratzer, Risse, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen) und ihr ordnungsgemäßes Funktionieren.

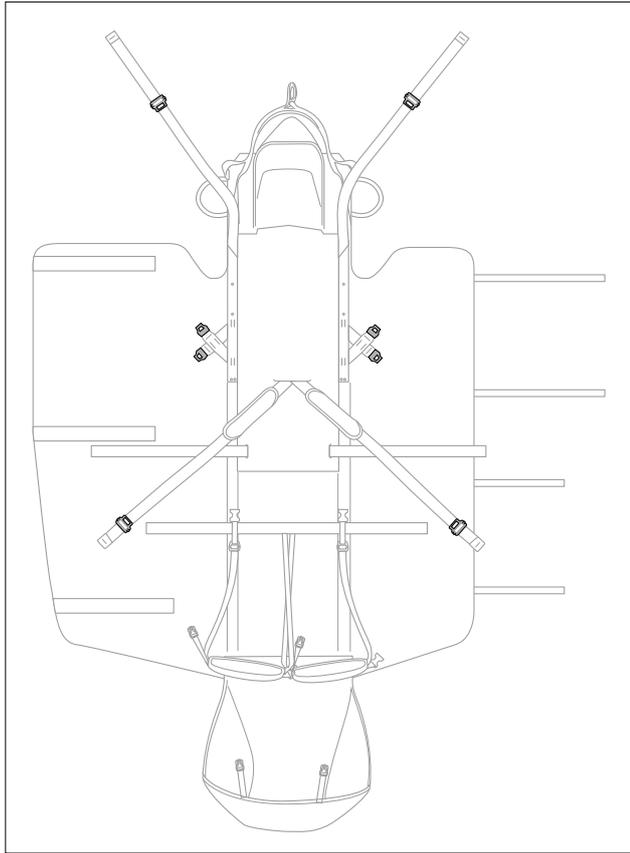

- Überprüfen Sie den Zustand der Fußhalterungen (Einschnitte, aufgequollene Stellen, Beschädigungen und Abnutzungserscheinungen aufgrund von Benutzung, Hitzeeinwirkung, Chemikalien) und das ordnungsgemäße Funktionieren der Einstellschnallen.

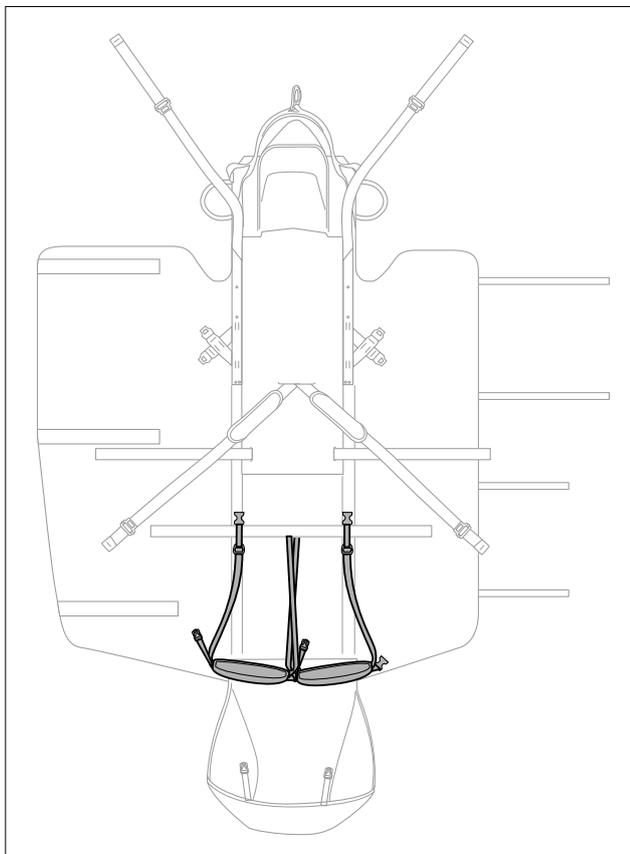

- Überprüfen Sie den Zustand der Schaumstoffmatratze.

